

# CTC(血中循環腫瘍細胞)検査

## 微小流路デバイス(Microfluidic Chip)法

### 血液検体の発送方法・梱包方法・注意点

#### ◆ 発送方法および注意点

<送付物> 依頼書、検体 (Streck社採血管「Cell-Free DNA BCT<sup>®</sup>」使用)

<発送前>

完全予約制で受付けておりますので、必ずご希望の日程と検体数を、事前にメールまたはFAXにてご連絡ください。なお、万が一予約が一杯の際には、日程変更のお願いをさせていただく場合もございますので、何卒ご了承ください。

<発送時>

- (1) 宅配便の通常便・着払いにてお送りください(冷蔵冷凍便は不可)。
- (2) 採血時から48時間以内に弊社へ必着するようお送りください。
- (3) 受付日・時間帯：祝祭日を除く平日の火曜日から金曜日まで、午前必着。  
※午前必着のため、事前に宅配業者へ対応可能な集荷時間をご確認ください。

#### ◆ 梱包方法

(1) 発砲スチロールの箱と緩衝材をご用意ください。


※緩衝材は通常のエア梱包資材をご使用ください。新聞紙は濡れて冷える場合がございますので避けてください。緩衝材はできるだけ隙間なく詰めてください。

※箱のサイズはおよそタテ20cm×ヨコ25cm×高さ20cm程度で十分です。採血管を立てた状態であれば、サイズの大小に支障はありません。

(2) 採血管の全面を緩衝材で厚く包み、輪ゴム等でしっかりと留めてください。

(3) 箱の中に採血管を立てて入れ、テープでしっかりと蓋を締めてください。

※採血後は室温を保った状態が必要なため“箱の中には”保冷剤を絶対に入れないでください。ただし気温が30℃を超えるような猛暑日には、保冷剤での調整をお願いする場合がございます。

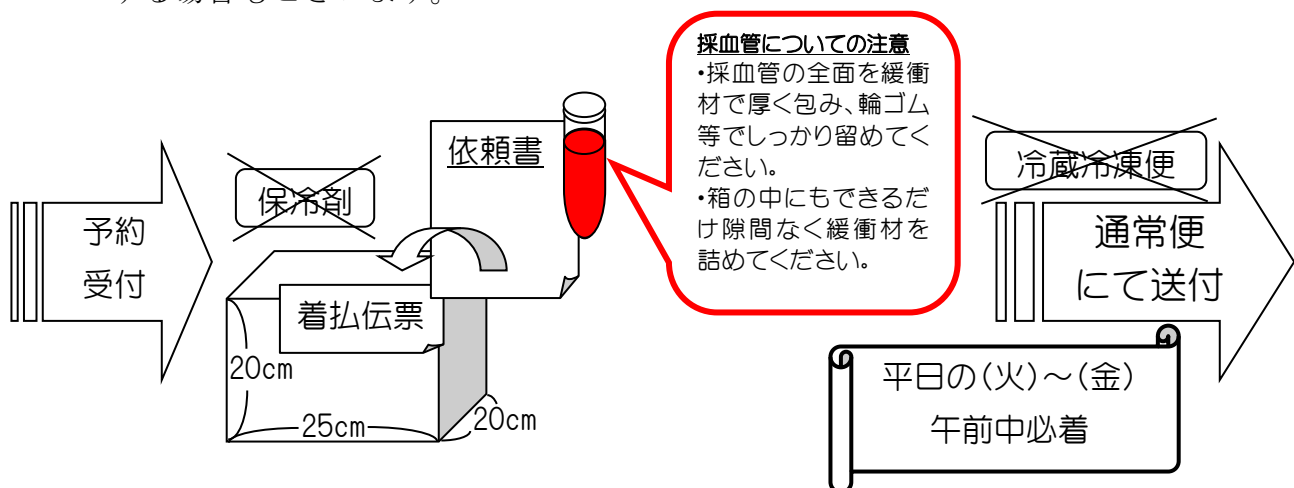

ご不明な点がございましたら下記連絡先までお問合せください。

<送付先・連絡先>

株式会社日本遺伝子研究所 CTC ラボ

〒983-00013 宮城県仙台市宮城野区中野 1-5-28

TEL:022-388-9747 FAX:022-388-9740 E-mail:ctc-lab@ngri.co.jp