

CTC(血中循環腫瘍細胞)検査

微小流路デバイス(Microfluidic Chip)法

血液検体の発送方法・梱包方法・注意点

➤ 発送方法および注意点

＜送付物＞ 依頼書、Strech社採血管

＜発送前＞

事前予約が必ず必要となります。検体の到着日時と検体数を、事前にメールまたは FAX にてご連絡ください。なお、万が一予約が一杯の際には、日程変更のお願いをさせていただきます場合もございますので、何卒ご了承ください。


＜発送時＞

- (1) 冷蔵タイプのクール便、着払いにてお送りください。
- (2) 採血時から48時間以内に弊社へ到着するようお送りください。
- (3) 受付日・時間帯：(原則)祝祭日を除く平日の火曜日から金曜日まで、午前中必着
※午前中必着のため、事前に宅配業者へ対応可能な集荷時間をご確認ください。

➤ 梱包方法

- (1) 発砲スチロールの箱と緩衝材をご用意ください。箱のサイズはおよそ、タテ20cm×ヨコ25cm×高さ20cm程度で十分です。採血管を立てた状態であれば、サイズは小さくても大きくても支障はありません。緩衝材はできるだけ隙間なく詰めてください。
- (2) 採血管の全面を緩衝材で厚く包み、輪ゴム等でしっかりと留めてください。
- (3) 箱の中に採血管を立てて入れ、テープでしっかりと蓋を締めてください。

※採血後は室温を保った状態が必要なため“箱の中には”保冷剤を絶対に入れないでください。

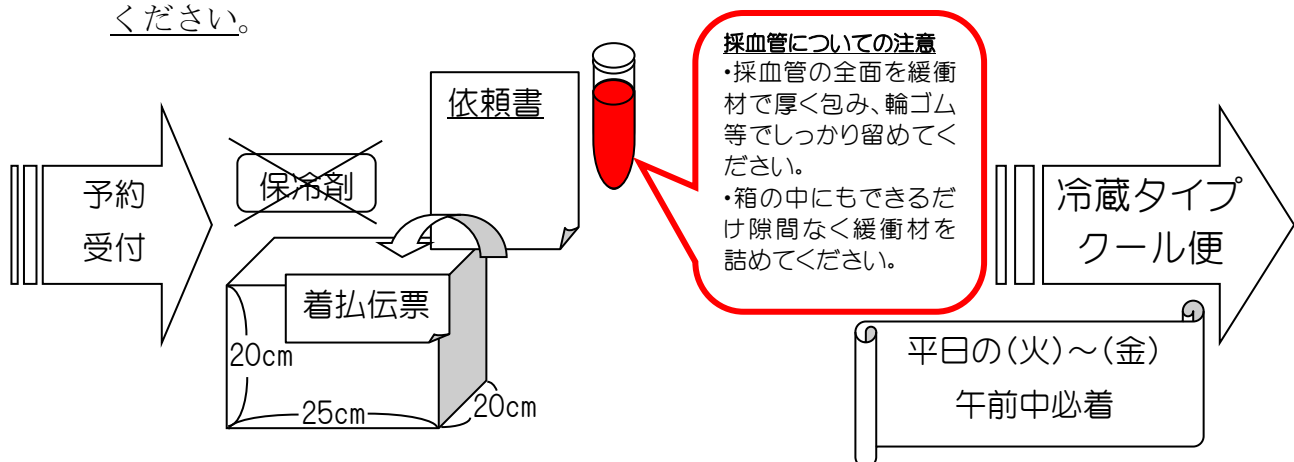

ご不明な点がございましたら下記連絡先までお問合せください。

＜送付先・連絡先＞

株式会社日本遺伝子研究所 CTC ラボ

〒983-00013 宮城県仙台市宮城野区中野 1-5-28

TEL:022-388-9747 FAX:022-388-9740 E-mail:ctc-lab@ngri.co.jp